



Technische Spezifikationen

- Gesamthöhe.....22"
- Gesamtbreite24"
- Gesamtlänge72"
- Gewicht70 lbs (31 kg)
- Gewichtskapazität600 lbs (272 kg)

Produktbeschreibung **MD**

Verwendungszweck: Die EB8000-Bank ist für den Einsatz in klinischen Umgebungen vorgesehen, um Patienten während chiropraktischer Behandlungen zu unterstützen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen


- Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtskapazität des Tisches von 600 lbs (272 kg).
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Muttern, Bolzen und Schrauben.
- Dieser Tisch ist NICHT für die Verwendung mit anderem Zubehör vorgesehen.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile von Pivotal Health Solutions.
- Wenden Sie sich bei Bedarf an Pivotal Health Solutions (1-800-743-7738).





Benötigte Werkzeuge für die Montage

- Zwei 1/2-Zoll-Schlüssel
- Ein 3/8-Zoll-Schraubenschlüssel

Wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Support von Pivotal Health Solutions unter 800-743-7738.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, Stellen Sie sicher, dass Sie ALLE unten aufgeführten Befestigungselemente und Teile haben:

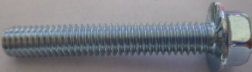
PART		QUANTITY INCLUDED	DESCRIPTION	PHS REPLACEMENT #
A		8X	5/16-18 Nylon Insert Lock Nut	87561
B		8X	5/16-18 x 2-1/2 Hex Head Bolt	66224
C		16X	1/4-20 x 1-3/4 Serrated Bolt	60822
D		2X	1/4-20 x 1-1/2 Hex Head Bolt	60440
E		2X	1/4-20 Nylon Insert Thin Locknut	95769

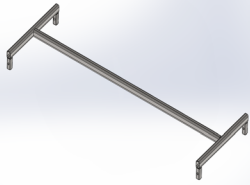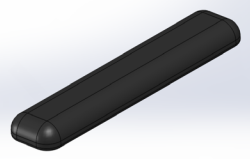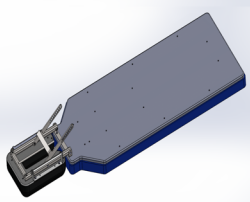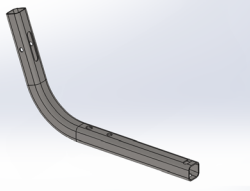PART		QUANTITY INCLUDED	PART DESCRIPTION	PHS REPLACEMENT #
1		1X	Bottom Brace	81006
2		2X	BENCH LEG	81005
3		2X	ARM REST	81008
4		2X	ARM CUSHION	81020
5		1X	TOP CUSHION ASSEMBLY	
6		2X	HEAD LOCK TUBE	81013

Montage SCHRITT 1: Bringen Sie die untere Strebe an **1** zu den Bankbeinen **2**^{2X} mit 2-½" Schraube **B**^{4X} und Kontermutter **A**^{4X}.

HINWEIS: Verschluss **A** geht ins Innere des Rahmens. (**Siehe Detail 2.1**).

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Armlehnenlöcher in den Bankbeinen in die gleiche Richtung zeigen (**Siehe Detail 2.2**).

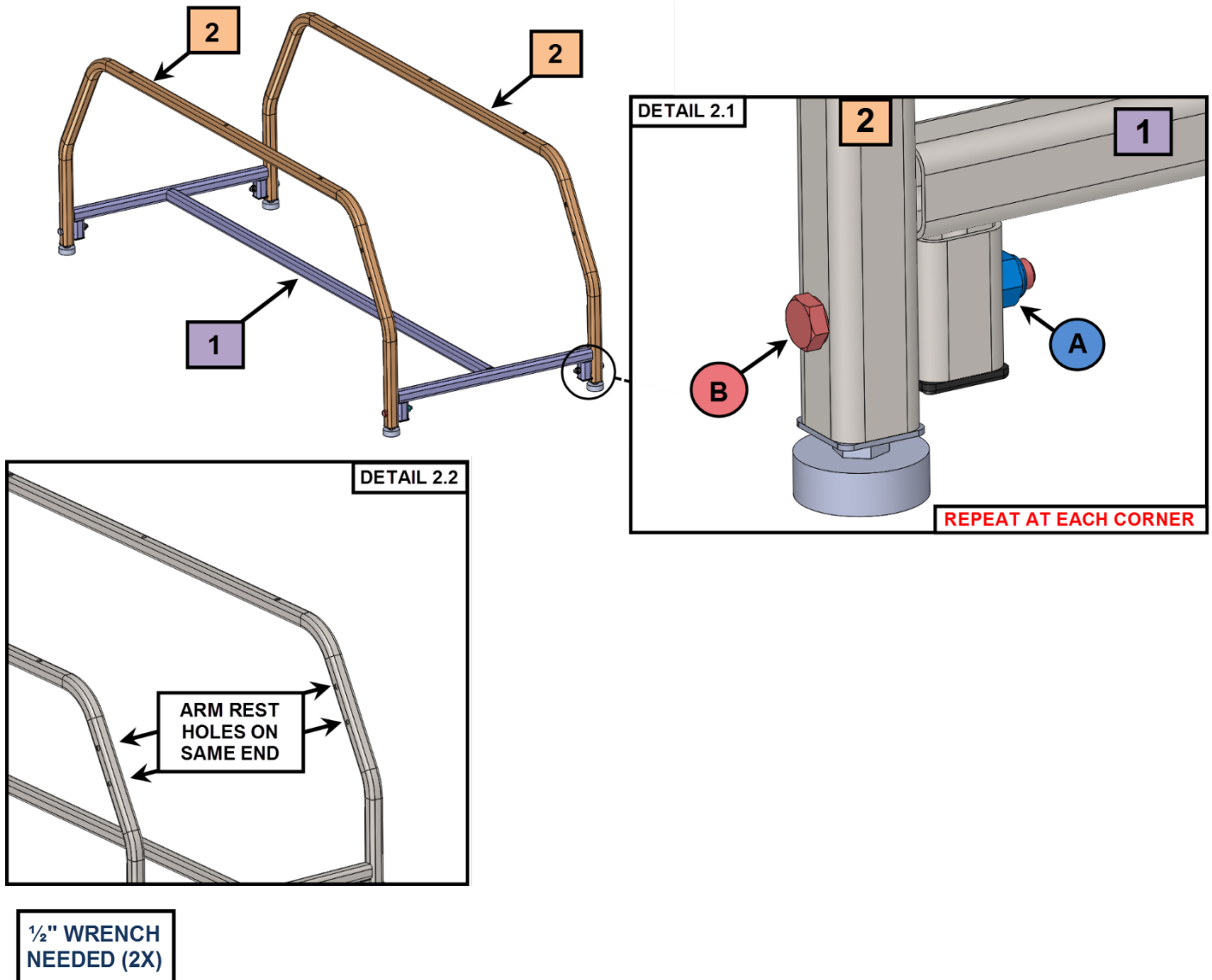


UM DIE MONTAGE ZU ERLEICHTERN, LASSEN SIE ALLE HARDWARE LOSE, BIS SIE VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT SIND.

Montage SCHRITT 2: Armlehne anbringen **3**^{2X} am Grundrahmen mit 2-½-Zoll-Bolzen **B**^{4X} und Kontermutter **A**^{4X}.

HINWEIS: Verschluss **A** geht ins Innere des Rahmens. (**Siehe Detail 2.3**).

HINWEIS: Die Armlehnen sollten nach unten geneigt sein.

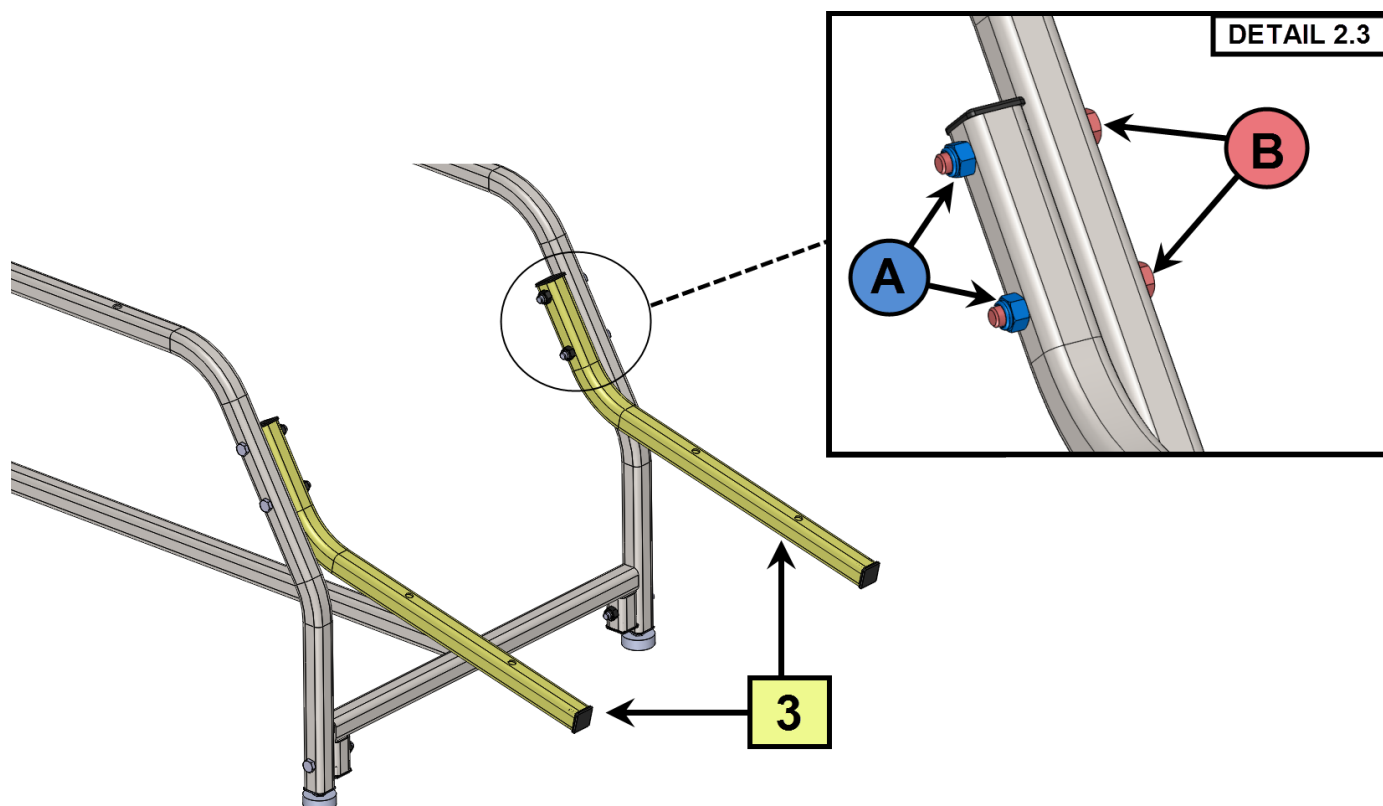


**½" WRENCH
NEEDED (2X)**

UM DIE MONTAGE ZU ERLEICHTERN, LASSEN SIE ALLE HARDWARE LOSE, BIS SIE VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT SIND.

Montage SCHRITT 3: Armkissen anbringen **4**^{2X} an Armlehne mit 1-3/4"

Schraube **C**^{4X} (Siehe Detail 2.4).

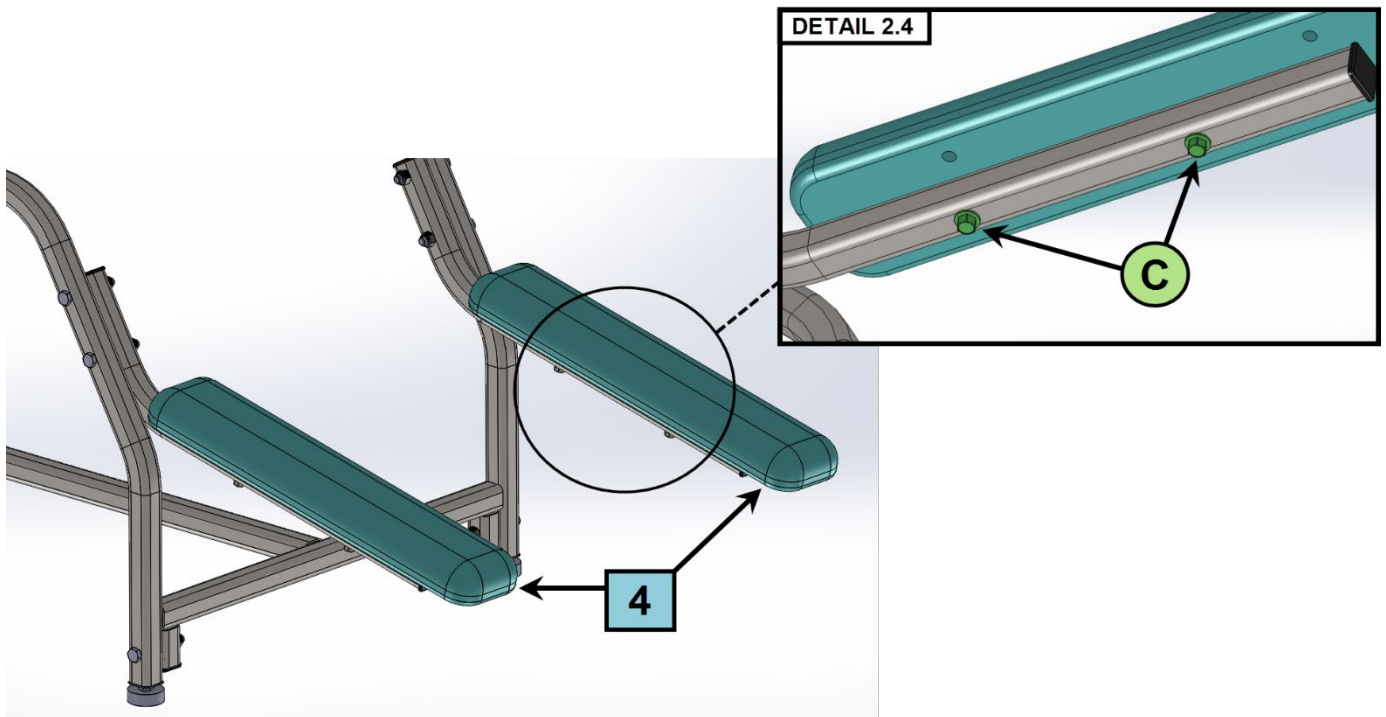


**3/8" WRENCH
NEEDED**

**UM DIE MONTAGE ZU ERLEICHTERN, LASSEN SIE ALLE HARDWARE LOSE, BIS
SIE VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT SIND.**

Montage SCHRITT 4: Schieben Sie die Kopfhalterung durch die Schlitzte im Kopfverriegelungsrohr **6**^{2X}.

HINWEIS: Bringen Sie die Kopfverriegelungsrohre an der oberen Kissenbaugruppe an **5** mit 1-3/4" Schraube **C**^{6X}.

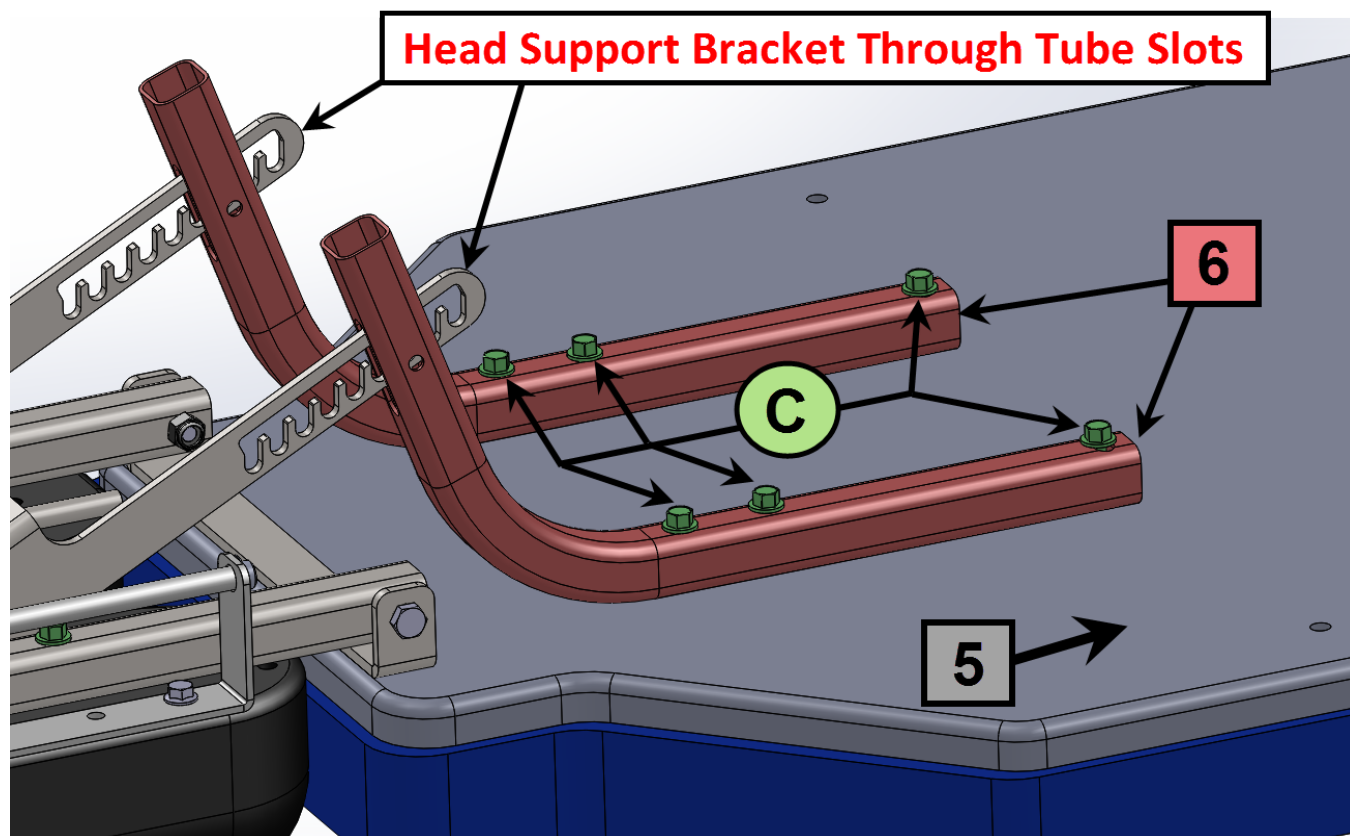


UM DIE MONTAGE ZU ERLEICHTERN, LASSEN SIE ALLE HARDWARE LOSE, BIS SIE VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT SIND.

Montage SCHRITT 5: Befestigen Sie die Kopfstützenhalterungen mit ¼-

20x1-½-Schrauben an den Kopfverriegelungsrohren ^{2X} und ¼-20

Kontermutter ^{2X} .


HINWEIS: Kontermuttern gehen in die Rohre. (Siehe Detail 2.5)

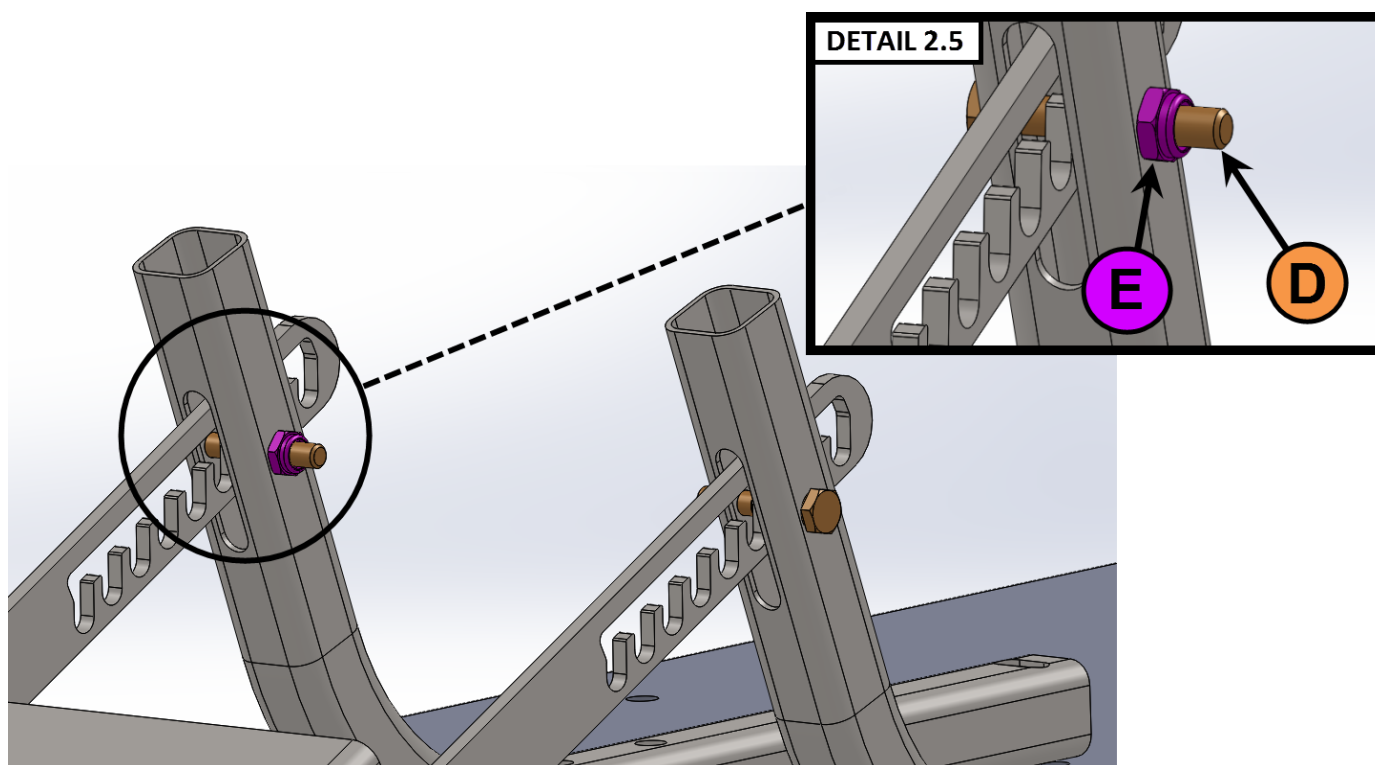

UM DIE MONTAGE ZU ERLEICHTERN, LASSEN SIE ALLE HARDWARE LOSE, BIS SIE VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT SIND.

Montage SCHRITT 6: Befestigen Sie die obere Kissenbaugruppe mit einer 1-3/4-Zoll-Schraube am Grundrahmen ^{6X} **C**.

3.6.1 Das obere Kissen wird an sechs Stellen am Rahmen befestigt.

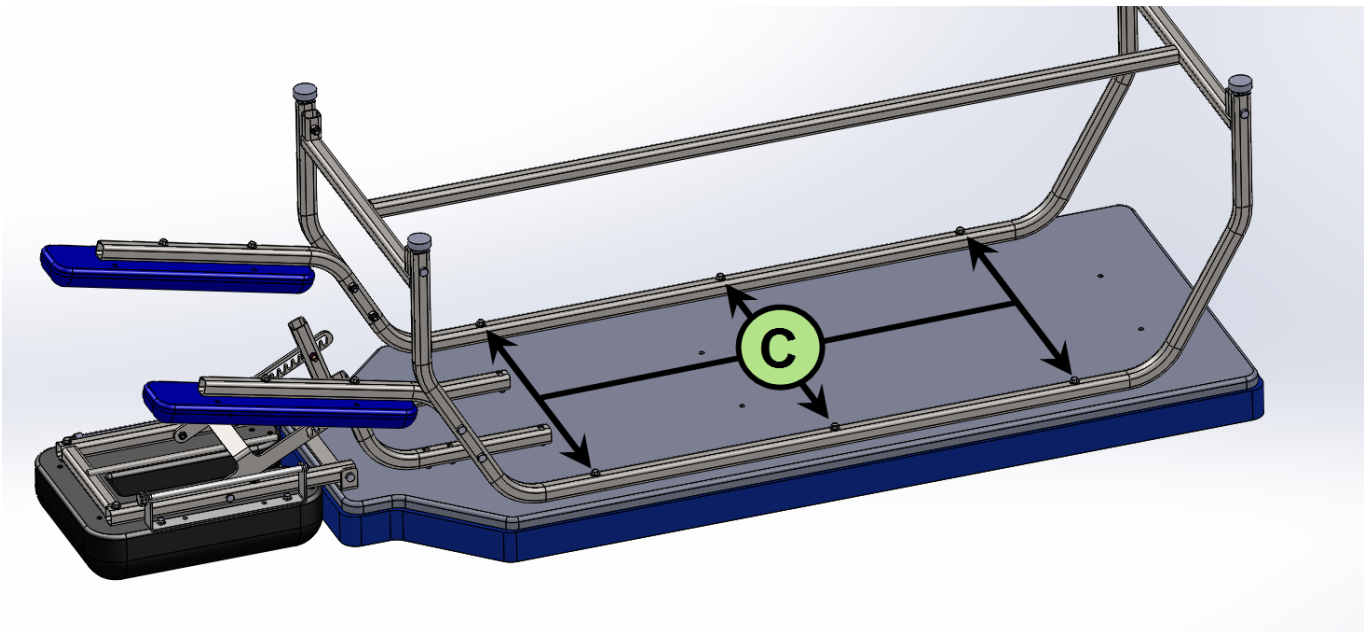

**3/8" WRENCH
NEEDED**

**STOP MONTAGE IST ABGESCHLOSSEN. GEHEN SIE ZURÜCK
UND ZIEHEN SIE ALLE HARDWARE AUF DEM TISCH VOR
DEM GEBRAUCH FEST.**

Polsterreinigung und -pflege

Bei leichten Verschmutzungen eine Lösung aus 10 % flüssigem Haushaltsspülmittel mit warmem Wasser mit einem weichen, feuchten Tuch auftragen. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

- Befeuchten Sie bei starker Verschmutzung ein weiches weißes Tuch mit einer Eins-zu-eins-Lösung (1:1) aus Fantastik® und Wasser ODER Formula 409® und Wasser. Vorsichtig reiben und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abspülen.
- Befeuchten Sie bei hartnäckigeren Flecken ein weiches weißes Tuch mit einer Lösung aus Haushaltsbleiche (10 % Bleichmittel / 90 % Wasser). Vorsichtig reiben und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abspülen, um die Bleichmittelkonzentration zu entfernen.
- KEINE REINIGUNGSMITTEL AUF ALKOHOLBASIS VERWENDEN!
- UNSACHGEMÄSSE REINIGUNG FÜHRT ZUM GARANTIEVERLUST!

Diese Informationen stellen keine Garantie dar und entbinden den Benutzer nicht von seiner Verantwortung für die ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts und aller Reinigungsmittel. Die Verwendung bestimmter Mittel kann das Aussehen der Oberfläche und die Lebensdauer von Vinyl beeinträchtigen. Pivotal Health Solutions übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung solcher Mittel auf dem Vinyl.

Service, Garantie, Kontaktinformationen des Herstellers

Wenn im Zusammenhang mit diesem Gerät ein schwerwiegender Vorfall auftritt, melden Sie den Vorfall Pivotal Health Solutions mit den unten angegebenen Kontaktinformationen.

Wenn sich der Vorfall in der EU ereignet, melden Sie den Vorfall auch der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist.

Wenden Sie sich bei Bedarf an Pivotal Health Solutions mit den unten stehenden Kontaktinformationen oder per E-Mail service@pivotalhealthsolutions.com.

	Pivotal Health Solutions, Inc. 3003 9 th Ave. SW; Watertown, SD, 57201 USA
 800-743-7738	 011-1-605-753-0110  605-882-8398
	http://www.pivotalhealthsolutions.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

Rev F 07/17/2023